

# Praxis-Checkliste Intraoral-Scan Primescan




**1 Startbildschirm**




Über Startbildschirm neuen Patienten anlegen.

**2 Indikation auswählen**

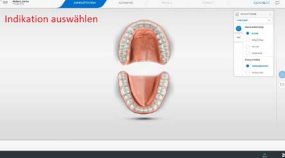


Restaurationsart und Zähne auswählen


**3 Material auswählen**

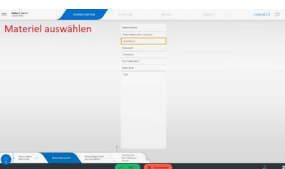

**4 Zahnfarbe auswählen**

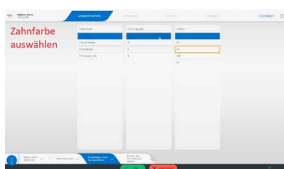


**5 Zwischenkontrolle**

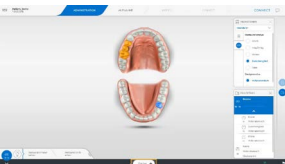

1. Alle Angaben richtig – weiter mit Nr. 6 oder
2. Angaben korrigieren oder
3. Auftrag komplett löschen

**6 Scannen**

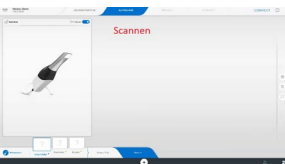


UK  OK  Okklusion

Zusatzinformation zum Scan Implantatversorgungen:

- 1x Kiefer scannen ohne Heilkäppchen und ohne Scanbody
- + 1x Kiefer scannen mit Scanbody
- + 1x Antagonisten scannen
- + 1x Relation scannen

**7 Mit Portal verbinden**

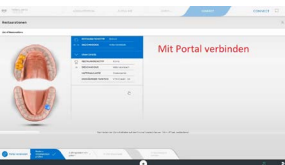

Als Auftragnehmer Dental Technik Kiel anklicken und eintragen

**8 Delacom-Laborauftrag ausfüllen** **oder**




Vorname, Nachname, Krankenkasse, Termin anhand Timer aussuchen

**Schriftlichen Auftrag per Fax ausfüllen**



Vorname, Nachname, Krankenkasse, Termin anhand Timer aussuchen

**9 Termin auch im Portal auswählen**

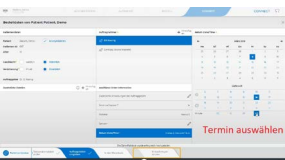

Termin wie Delacomauftrag auswählen und Daten versenden!