


# Präparationsempfehlungen

## Preparation guidelines

### Allgemeine Hinweise

#### General indications

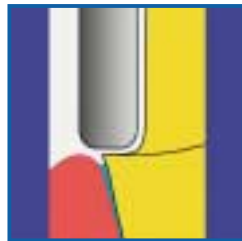

Ausgeprägte Hohlkehlp  
präparation (90°).  
*Pronounced chamfer  
(90°).*




Stufenpräparation mit  
innen gerundeter Kante.  
*Shoulder preparation with  
rounded cervico-cervical  
line angle.*



Zirkuläre Schnitttiefe mindes-  
tens 1 mm.  
*Circular marginal cutting at  
least 1 mm.*

### Frontzahnrestaurationen

#### Anterior preparations

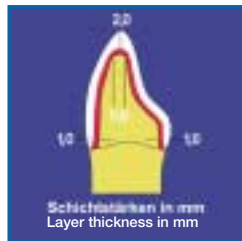

Frontzahnpräparation.  
*Anterior preparations.*



Axiale und inzisale Re-  
duktion.  
*Axial and incisal re-  
duction.*



Palatale Reduktion.  
*Palatal reduction.*

### Seitenzahnrestaurationen

#### Posterior preparations



Okklusale Reduktion der  
anatomischen Form  
um mindestens 1,5 mm.  
*Occlusal substance re-  
duction at least 1.5 mm.*



Axiale Reduktion der  
anatomischen Form  
um mindestens 1 mm.  
*Axial substance reduc-  
tion at least 1 mm.*



Okklusalfäche im Winkel zwi-  
schen 120° und 140°, Konus-  
winkel der korrespondieren-  
den axialen Flächen 3°-4°.  
*120°-140° opening angle of  
the occlusal surfaces. The  
cone angle of the corre-  
sponding axial surfaces should  
be 3°-4°.*